

Инструкция по применению:



Подготовка к использованию:

- ▶ Установите регулятор мощности вашего пылесоса на минимум.
Внимание: Рекомендуемая потребляемая мощность пылесоса составляет 800-1800 Вт.
| В случае, если регулятор мощности у вашего пылесоса отсутствует, используйте приоткрывающееся окошко на трубке пылесоса для регулировки давления, что также не допустит перегрева вашего пылесоса.
- ▶ Включите пылесос в розетку.
| Рекомендуется поместить пылесос на максимальном расстоянии от ребенка, но так чтобы была возможность включить и выключить пылесос.

- ⊘ Не используйте аспиратор для других целей, кроме описанных в инструкции.
- ⊘ Не используйте аспиратор в случае повреждения одной из деталей.

Сборка и подключение:

- 1 Перед первым использованием промойте аспиратор и насадку мыльным раствором;
- 2 Вставьте сменную многоразовую насадку (А) в колбу-коллектор (В);
- 3 Вставьте насадку (С) в трубку пылесоса;
- 4 Включите пылесос.

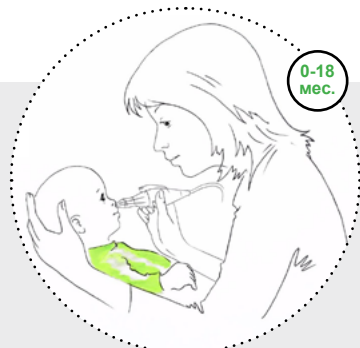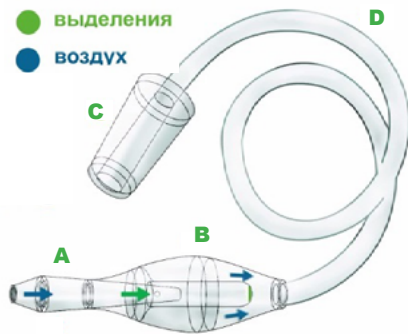


Способ применения:

- 1 Выберите удобную позу для проведения процедуры в зависимости от возраста ребенка:

При использовании аспиратора для новорождённых и грудных детей (0-18 месяцев), рекомендуется разместить ребенка в позе полулежача или сидя, насколько это возможно. В подобном положении, процесс аспирации будет наиболее эффективен и прост.

Детей младшего и среднего возраста (старше 18-ти месяцев) рекомендуется усадить на колени, спиной к себе. Слегка наклонить голову вперед, чтобы облегчить удаление носовых выделений.

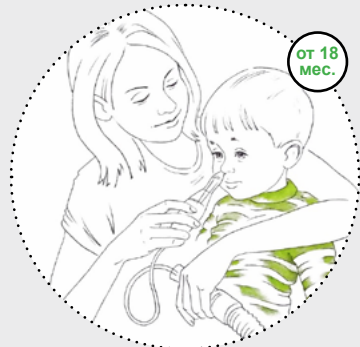

Совет: Для большей эффективности перед удалением слизи рекомендуется провести орошение носовой полости 0.9%-м солевым раствором, это позволит подготовить слизистую к процедуре, очистить от засохших выделений. При выборе раствора, пожалуйста, обратитесь за консультацией к врачу или фармацевту.

- 2 Вставьте насадку в один из носовых ходов ребенка. Конструкция аспиратора не позволит вставить насадку глубоко, что дополнительно обеспечивает безопасность процедуры.

Для повышения эффективности рекомендуется слегка передвигать насадку из стороны в сторону, а также вверх-вниз, не вынимая при этом из ноздри.



- i Совет:** При использовании аспиратора не рекомендуется задерживать дыхание, закрывать рот. В этом случае от перепада давления может заложить уши. Чаще всего дети придерживаются вышеперечисленных рекомендаций на подсознательном уровне.

- 3 Извлеченную слизь вы увидите в прозрачной конструкции прибора.

- i Совет:** В случае большого скопления слизи рекомендуется держать насадку максимально перпендикулярно полу, так чтобы исключить попадание слизи в трубку аспиратора и далее в пылесос. В случае попадания слизи в пылесос, рекомендуется сменить или промыть пылесборник вашего пылесоса по завершению процедур.

- 4 Повторите процедуру для другого носового хода.

- i Совет:** Каждый сеанс должен длиться не более 5 секунд. В случае если этого недостаточно, рекомендуется провести повторные сеансы с перерывами в 3-5 секунд. Повторение целесообразно до тех пор, пока в колбе появляются новые порции выделений.

- 5 Выключите пылесос.

- 6 После процедуры разберите аспиратор:



Промойте прибор теплым мыльным раствором, дезинфекция не требуется. Не используйте абразивные чистящие средства, а также химические растворы, это может повредить аспиратор.

- 7 Просушите прибор. Бейби-Вак снова готов к использованию.

Хранение: Аспиратор необходимо хранить:

- ▶ В разборном виде в недоступном для детей месте.
- ▶ В помещении при температуре воздуха от +5° до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- ▶ **Срок годности: см. на упаковке.**



Производитель:

Иллеш Чок эш Тарша Кфт., Венгрия
1146 Будапешт, Аджтоси Дюрер сор. 35.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
(поставщик):**

ООО «Бейби-Трейд»
193318, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.Пятилеток, 16.
тел. (812) 600 4 604,
факс (812) 600 4 664
e-mail: online@baby-vac-spb.ru
Рег. уд. № Р3Н 2014/1635 от 20.05.2014